


Gebruiksaanwijzing NeedleSafe®

1

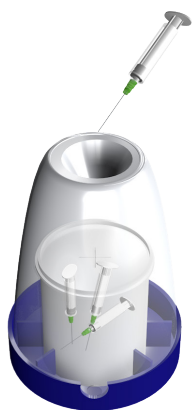


Deponer één gebruikte injectiespuit per keer in de NeedleSafe

2




Gelijktijdig deponeren van meerdere spuitjes veroorzaakt beknelling

3

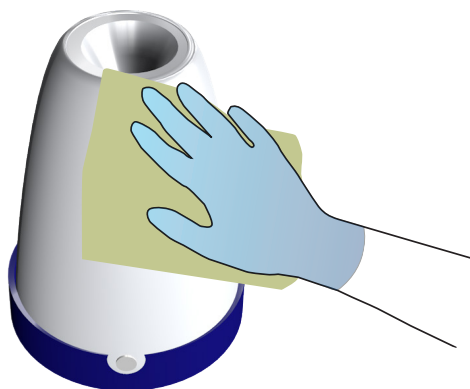


Reinig de NeedleSafe met een desinfecterend doekje

4

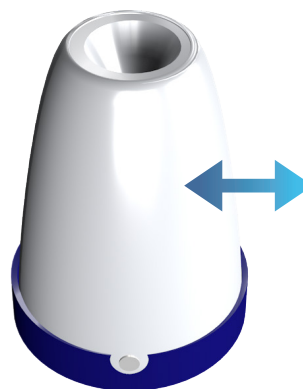

Schud de NeedleSafe af en toe lichtjes (op de plaats) om ophoping van de spuitjes te voorkomen

5

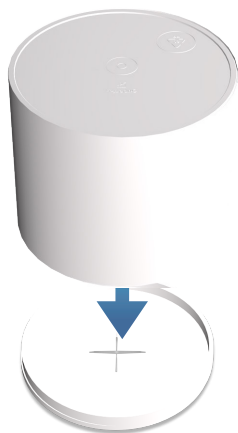

Breng tijdig een nieuw emmertje aan. Leg het deksel op de kop op tafel...

6



...en druk het emmertje in de deksel totdat deze duidelijk geheel rondom vastklikt

7



Verzegel direct de stervormige opening van een vol emmertje met de sticker

8



Verwijder nooit een sticker of deksel van een emmertje met gebruikte spuitjes

Gebruiksaanwijzing NeedleSafe®

De NeedleSafe is een basis met daarop een conus die ten opzichte van elkaar kunnen worden afgesloten. De NeedleSafe wordt geleverd met een leeg binnenemmertje. In een NeedleSafe kunt u veilig injectiespuiten bewaren. Neemt u de volgende aandachtspunten in acht voor een juist gebruik van de NeedleSafe.

- 1 Een gebruikte injectiespuit wordt met de naald naar beneden in de hals van de conus in het binnenemmertje gedeponereerd. Deponeer slechts één gebruikte injectiespuit per keer in de NeedleSafe, Indien meerdere injectiespuiten tegelijk in de conus van de NeedleSafe komen, kunnen deze bekneld raken. Zorg ervoor dat de conus altijd recht en stabiel op de basis staat.
- 2 Een enkele keer kan er nog wat vloeistof uit een gebruikte injectiespuit druppelen op de NeedleSafe. Maak dit schoon met een desinfecterend doekje. Denk aan het dragen van handschoenen!
- 3 De injectiespuiten hopen zich op in de NeedleSafe. Om de volledige capaciteit van het binnenemmertje te benutten verdient het aanbeveling de NeedleSafe regelmatig (na iedere 10 spuiten) licht en voorzichtig (op de plaats) heen en weer te schudden. Er ontstaat zo weer voldoende ruimte!
- 4 Breng tijdig een nieuw, leeg emmertje aan in de NeedleSafe! Zodra de laatste injectiespuit rechtop blijft staan in de hals van de conus en deze door schudden niet in het emmertje valt moet in de meeste gevallen de binnenemmer verwisseld worden. Ontsluit de conus van de basis en neem de conus (recht omhoog) weg. Verwijder vervolgens het binnenemmertje. Denk aan het dragen van handschoenen en pas op met de eventueel nog in de hals van de conus achtergebleven laatste injectiespuit.
- 5 Verzegel direct na het verwijderen van het emmertje de stervormige opening in het dekseltje met de bijgeleverde verzegelsticker. Deze stickers worden bij elke emmerleverantie voldoende meegeleverd. Op de sticker is duidelijk aangegeven dat het om medisch afval gaat. Deponeer de volle binnenemmer in een UN gekeurde omverpakking op de daarvoor in uw organisatie afgesproken plaats.
- 6 Probeer een eenmaal opgeplakte sticker nooit los te peuteren of te verwijderen. Laat de verzegeling intact. Hetzelfde geldt voor het deksel van het emmertje waarin zich gebruikte injectiespuiten bevinden. Probeer dit deksel nooit van het emmertje te verwijderen!
- 7 Een nieuw emmertje dient als volgt van een deksel te worden voorzien: Leg de deksel op de kop op tafel of bureau, vervolgens het emmertje in de deksel drukken totdat deze duidelijk geheel rondom vastklikt! Handel zorgvuldig en nooit overhaast. Gebruikte injectiespuiten kunnen gevaarlijk zijn voor uw gezondheid!

Voor meer informatie over de NeedleSafe verwijzen wij u naar de producent MF Medical Services middels onze website www.needlesafe.nl

Garantiebepalingen

De leverancier garandeert de deugdelijke kwaliteit en constructie van de NeedleSafe door de gebruikte materialen en assemblage voor de periode van een jaar na levering. Controleer de NeedleSafe na levering op gebreken. Duidelijk zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 1 dagen na levering te worden gemeld. Daarna kan de leverancier niet meer aansprakelijk worden gesteld. De ongebruikte NeedleSafe dient in originele verpakking aan leverancier te worden getourneerd.

Herstellingen die onder de garantievoorwaarden vallen zullen door de leverancier bij normaal gebruik en na het opvolgen van de gebruiksaanwijzing kosteloos worden hersteld. Uitgesloten van iedere aanspraak zijn beschadigingen, vernietiging of verlies van de NeedleSafe door onjuiste behandeling, transport of gebrekkige verpakking. Leverancier is enkel aansprakelijk voor de deugdelijkheid van het product en niet voor het gebruik en kan daarvoor ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.



Winnaar van de Gelderse
Vormgevingsprijs
1999

I.D. *Nominatie ID-AWARD*
2001